



ThermoCap Ohrthermometer Schutzkappen

(Kompatibel mit ThermoScan PRO6000)

1. Entnahmepackung aus der Spender-Box entnehmen.
2. Entnahmepackung entlang der Perforation öffnen.
3. Entnahmepackung in die Aufbewahrungsstation einsetzen.
4. Die Messspitze in die Packung drücken, um eine neue Schutzkappe aufzusetzen. Darauf achten, dass die Schutzkappe fest auf der Messspitze sitzt.
5. Nach der Messung die gebrauchte Schutzkappe entsorgen.

Hinweis: Zur Sicherstellung von Genauigkeit und Hygiene die Schutzkappe nach jedem Gebrauch wechseln. Von Kindern fernhalten.

